



Accent *Prime*

Love Your Shape

TECNOLOGÍAS COMBINADAS
PARA RESULTADOS
MEJORADOS Y DURADEROS

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA
DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO

CLÍNICAMENTE PROBADO EN
EXTENSOS ESTUDIOS

RÁPIDO, FÁCIL DE USAR, CON
TECNOLOGÍA PLUG & PLAY

SIN DESECHABLES

LLEVE A SUS CLIENTES A LA PLENITUD

Accent Prime™ es la estación de trabajo de primera línea de Alma para el perfilado corporal, el estiramiento de la piel y la mejora estética. La plataforma combina las últimas innovaciones en tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia (RF) para ofrecer tratamientos efectivos y altamente personalizados con resultados naturales y duraderos.

Respaldata por años de éxito clínico comprobado como un elemento básico en el campo del perfilado corporal, la plataforma Accent Prime de Alma presenta su última generación, que actúa sobre los adipocitos y fortalece el colágeno al mismo tiempo, lo que permite alcanzar resultados óptimos por medio del uso de múltiples tecnologías.

Una variedad de aplicaciones y enfoques de tratamiento le permiten brindar soluciones personalizadas para diferentes tipos y condiciones de piel, mientras que las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas capacidades, incluida la posibilidad de realizar tratamientos de perfilado corporal a una velocidad sin precedentes. Estas nuevas características reducen los tiempos de tratamiento y ofrecen resultados aún más potentes.

Accent Prime fue desarrollado por Alma, una marca de tecnología estética sólida y reconocida a nivel mundial. Desde 2007, Alma ocupa una posición de liderazgo con logros clínicos comprobados y un historial de seguridad impecable, y recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para la familia Accent de sistemas de perfilado corporal.

Con Accent Prime, tanto sus pacientes como su clínica están en buenas manos.

“Accent Prime combina las innovaciones más avanzadas en tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia, y brinda tratamientos rápidos, efectivos y altamente personalizados con resultados duraderos”

Dra. Ines Verner MD, Dermatóloga, Clínica Verner



¡NUEVO!

Accentuate



La libertad de hacer más

Aplicadores estacionarios de manos libres diseñados para el perfilado corporal que incorporan calentamiento por radiofrecuencia resonante distribuida y se utilizan exclusivamente con la plataforma Accent Prime de Alma. Con AlmaWave 40.68 MHz, Accentuate tensa y da forma a áreas extensas del cuerpo de forma segura y eficaz proporcionando energía dentro de la piel. Al ofrecer parámetros independientes para el lado izquierdo y el derecho, Accentuate también permite monitorear la temperatura del paciente en tiempo real, lo que agrega mayor control y libertad tanto para los profesionales como para los pacientes.

Accentuate proporciona resultados óptimos cuando se usa en un protocolo combinado después de UltraSpeed. Esta combinación sinérgica de tecnologías de RF y ultrasonido ofrece mayor eficacia y una mejora significativa de los resultados.


UltraSpeed



El aplicador UltraSpeed combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonido con una placa aplicadora extragrande para un perfilado corporal veloz. Es el dispositivo pionero de Alma en el uso de onda transversal y está disponible exclusivamente con la plataforma Accent Prime. UltraSpeed cuenta con un sonotrodo de tipo placa que emite ondas ultrasónicas a través de perfiles concéntricos para calentar el tejido que debe tratarse. La energía de ultrasonido emite ondas de ultrasonido longitudinales y transversales de manera simultánea, lo que elimina eficazmente las células adiposas rebeldes. El tiempo de tratamiento para el área abdominal completa se reduce a aproximadamente 20 minutos, lo que disminuye la fatiga del operador, mientras una cuadrícula de 600 cm² cubre un área de tratamiento especialmente grande.



Imágenes térmicas

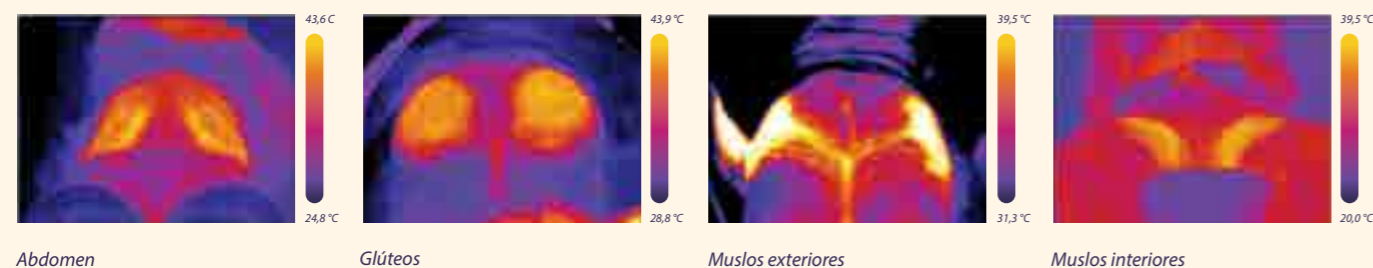

“Creo que el protocolo que combina UltraSpeed y Accentuate genera los mejores resultados de tratamiento para áreas grandes del cuerpo, incluidas el abdomen, los muslos y los glúteos. En apenas 1 hora, mis pacientes lucen una piel más tersa y perfilada. El valor agregado que logro con Accentuate es que puedo tratar a varios pacientes a la vez sin tener que estar presente personalmente durante el tratamiento”.

Dra. Stefania Enginoli, Studio Medico, Milán

ÁREAS DE TRATAMIENTO

- Abdomen
- Muslos exteriores
- Muslos interiores
- Glúteos



Cortesía del Departamento Clínico de Alma

¡NUEVO!

La solución de Alma para áreas pequeñas

Tres aplicadores.
Una solución sinérgica.

A medida que el mercado de la estética sigue evolucionando de acuerdo con las necesidades dinámicas de los pacientes, Alma reconoce que la segmentación y la sinergia permiten mejorar la eficacia y obtener mejores resultados.

Alma ha creado un concepto de Tratamiento de áreas pequeñas, formado por tres innovadores aplicadores: MiniSpeed/SpeedSculpt y TuneFace. Esta solución integra tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia, y funciona a la perfección con Accent Prime, la exitosa plataforma de perfilado corporal y facial de Alma.


ÁREAS DE TRATAMIENTO

MiniSpeed/SpeedSculpt:

- Debajo del mentón
- Parte posterior del brazo

TuneFace:

- Debajo del mentón
- Rostro

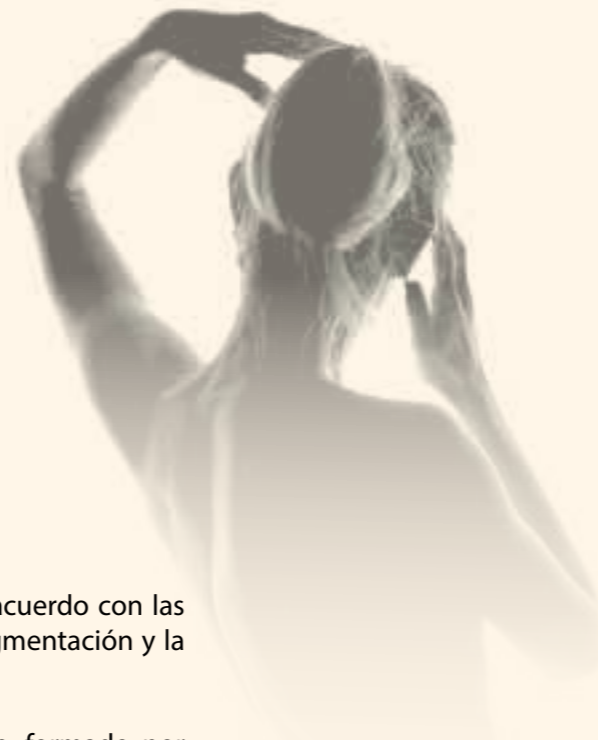

La combinación perfecta: **MiniSpeed, SpeedSculpt y TuneFace**

MiniSpeed se basa en una revolucionaria tecnología de ultrasonido creada con el objetivo de tratar áreas más pequeñas y brindar un tratamiento completo. Es, esencialmente, una versión más pequeña del aplicador UltraSpeed de Alma. Utiliza un área de contacto de sonotrodo de 55 mm de diámetro que emite ondas ultrasónicas guiadas a través de perfiles concéntricos para reducir rápidamente el volumen y el contorno del tejido adiposo.

SpeedSculpt emite ondas ultrasónicas guiadas a través de un sonotrodo aún más pequeño, de 44 mm de diámetro, lo que permite ofrecer tratamientos efectivos y seguros para áreas muy pequeñas.


El aplicador TuneFace, basado en RF y diseñado exclusivamente para tratamientos estacionarios de estiramiento de la piel, cuenta con un mecanismo de vacío asistido y complementa el protocolo para mejorar significativamente los resultados.

Trabajar con una combinación de los aplicadores MiniSpeed/SpeedSculpt y TuneFace es una **solución ideal para áreas pequeñas**, ya que se promueven mejores resultados para la reducción del volumen del tejido adiposo y el estiramiento de la piel en áreas que normalmente son más difíciles de alcanzar. Este protocolo sinérgico aprovecha lo mejor de cada mundo. Combina dos fuentes de energía distintas, cada una con sus propias ventajas y áreas de tratamiento específicas, y garantiza la eficacia a la vez que brinda resultados impresionantes y duraderos.


“Usar los aplicadores MiniSpeed y TuneFace juntos cuando trato áreas pequeñas me permite usar dos tecnologías diferentes de manera muy efectiva para diversas necesidades.

La posibilidad de alternar y combinar los dos aplicadores me brinda más control, incluso en áreas delicadas, y mejora significativamente los resultados de los tratamientos de mis pacientes”.

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Director Médico de Elite Laser Clinic & Laser Unit en el Hospital NISA, Madrid, España

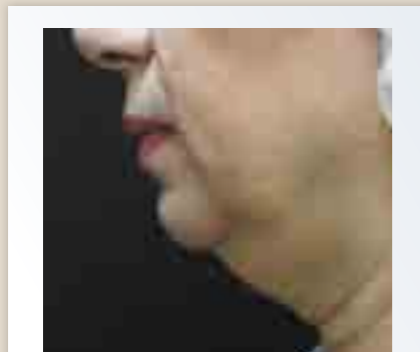

Antes

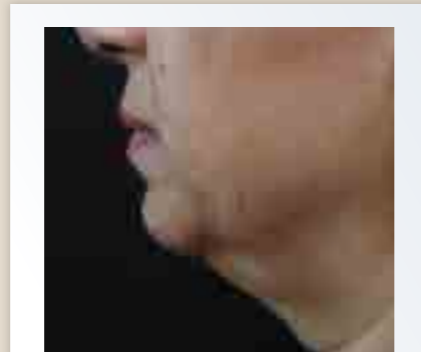


Luego de 2 tratamientos

Cortesía del Departamento Clínico de Alma

RESULTADOS DURADEROS GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Calentamiento dieléctrico **eficaz**

Accent Prime cuenta con calentamiento dieléctrico: un mecanismo único mediante el cual la energía de radiofrecuencia (RF) alta se transmite directamente al tejido y provoca una rápida rotación de sus moléculas de agua. Esta rotación genera una fricción que produce calor fuerte y **eficaz**. Debido a que la piel está compuesta principalmente por agua, el calentamiento que produce este mecanismo induce la contracción volumétrica dentro de la piel, lo que contrae las fibras existentes y estimula la formación de colágeno nuevo mientras mejora su grosor y alineación. Una alta frecuencia de RF permite un calentamiento profundo y **homogéneo** que genera resultados uniformes.

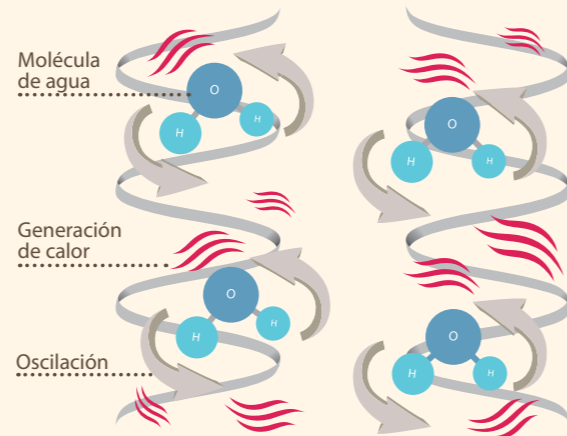

Adaptación de impedancias **poderosa**

Con una potencia de hasta 300 vatios y una pérdida de energía mínima a través de la adaptación de impedancias, Accent Prime ofrece máxima potencia para todos los tratamientos. Cuando la energía de radiofrecuencia se transmite al tejido, la resistencia eléctrica del cuerpo hace que la energía rebote hacia la fuente de energía. Con la potencia máxima más alta del mercado, Accent Prime supera eficazmente la impedancia del cuerpo reduciendo el reflejo y permitiendo que el tejido que debe tratarse absorba la máxima energía de radiofrecuencia.

UniPolar™ y AlmaWave **profunda**


La tecnología patentada* Alma Unipolar permite un **calentamiento profundo, enfocado y seguro** del tejido en varias profundidades dentro de la piel. Unipolar funciona con un solo electrodo que libera energía de radiofrecuencia concentrada que llega a las capas más profundas de la piel sin generar molestias al paciente. El uso de la longitud de onda óptima AlmaWave 40.68 MHz permite suministrar energía de manera más profunda y eficaz dentro del tejido de la piel.



Control de profundidad **enfocado**

La tecnología de control de profundidad de Accent Prime permite controlar la profundidad exacta del tratamiento, con un calentamiento enfocado dentro de las diferentes capas de la piel. El control de profundidad variable brinda a los profesionales flexibilidad y precisión para tratar el área objetivo a la profundidad específica necesaria para obtener resultados óptimos.

Los enfoques de tratamiento profundo y superficial también se pueden combinar para obtener un tratamiento totalmente personalizado, según el área a tratar, el tipo o grosor de la piel y la indicación.

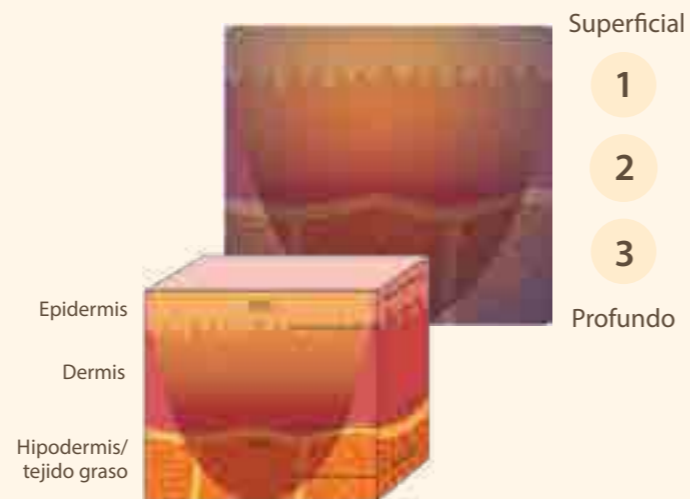

Trata el tejido adiposo

Cold Shear Waves™ y ultrasonido caliente

Se trata de la combinación de características de tecnología de ondas longitudinales y transversales de Accent Prime patentadas* para tratar selectivamente el tejido adiposo sin dañar el tejido circundante. Las vibraciones de ondas transversales rompen las membranas de las células adiposas, lo que lleva a la descomposición y liberación gradual de la grasa almacenada. La ventaja de este sistema es la emisión simultánea de ondas longitudinales y transversales, donde la onda longitudinal calienta las capas superiores de la piel y la onda transversal penetra profundamente en la hipodermis.

Microplasma™

Con tecnología de microplasma exclusiva y patentada,* el módulo Accent Microplasma™ proporciona un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel mediante la ablación y el calentamiento. El microplasma ablativo fraccional es una fuente de energía más suave que reduce significativamente el riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria (HPI). A través de la perforación controlada y el uso de energía enfocada, Microplasma trata el área afectada y mantiene intacto el tejido sano circundante. Esto permite que la piel sane más rápido a medida que se regenera la epidermis, lo que optimiza los resultados con un riesgo mínimo y reduce el tiempo de inactividad.

IMPACT™ (Uso transepidérmico)

Para mantener y extender aún más los resultados clínicos logrados por medio de la radiofrecuencia y el ultrasonido, el módulo patentado* Accent Prime IMPACT™ emplea tecnología de ultrasonido para administrar productos en la piel. Una vez que se ha perforado la piel por medio del módulo de microplasma, el módulo IMPACT emite ondas de presión acústica positivas y negativas intermitentes, lo que permite la penetración de agentes tópicos a través de los microcanales. Las vibraciones acústicas oscilantes crean un efecto de "tira y empuje" dentro de los canales, lo que contribuye a liberar el líquido intracelular acumulado y permite que los ingredientes activos alcancen la profundidad del tejido que debe tratarse.

INDICACIONES

Perfilado corporal y facial

Accent Prime utiliza el poder y la eficacia de las tecnologías combinadas para eliminar el exceso de grasa y la piel flácida, lo que mejora visiblemente la forma y el contorno del rostro y el cuerpo. La sinergia de las tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia logra resultados superiores a los de cualquier tecnología que actúa por sí sola. Las ondas de corte de ultrasonido frío destruyen el tejido adiposo de manera selectiva, mientras que la tecnología UniPolar RF acelera su metabolismo para un rápido drenaje linfático. La aplicación de energía térmica de radiofrecuencia induce un efecto de contracción volumétrica, lo que tensa y mejora la textura de la piel al tiempo que genera colágeno nuevo.

Aplicadores



Accentuate

Proporciona energía de radiofrecuencia dentro de la piel a través de 2 aplicadores de temperatura ajustable. Diseñado exclusivamente para el perfilado corporal de grandes áreas de tratamiento.



UltraSpeed

Combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonido con ondas ultrasónicas guiadas y un área de contacto de sonotrodo de 88 mm de diámetro para un perfilado rápido en áreas de tratamiento especialmente grandes.



MiniSpeed

Una versión reducida del aplicador UltraSpeed que utiliza un contacto de sonotrodo de 55 mm de diámetro para el tratamiento de áreas pequeñas.



SpeedSculpt

Una versión más pequeña que MiniSpeed. Utiliza un sonotrodo de 44 mm de diámetro, lo que permite realizar tratamientos efectivos y seguros en áreas muy pequeñas.



UniBody

Combina la tecnología UniPolar RF de alta energía con un anillo masajeador giratorio desmontable para brindar un calentamiento dérmico profundo al mismo tiempo que aumenta la circulación dentro del tejido subcutáneo.



Antes

Luego de 2 tratamientos




Antes

Luego de 7 tratamientos

Cortesía del Departamento Clínico de Alma

“El innovador aplicador UltraSpeed de Accent Prime ofrece una amplia cobertura y tiempos de tratamiento muy breves. Esta combinación única no solo es impresionante, sino que también produce excelentes resultados clínicos, lo que la convierte en una oferta esencial en nuestra clínica”.

Dr. Carlos Trillo, Cirujano plástico, EstetizArte, Argentina

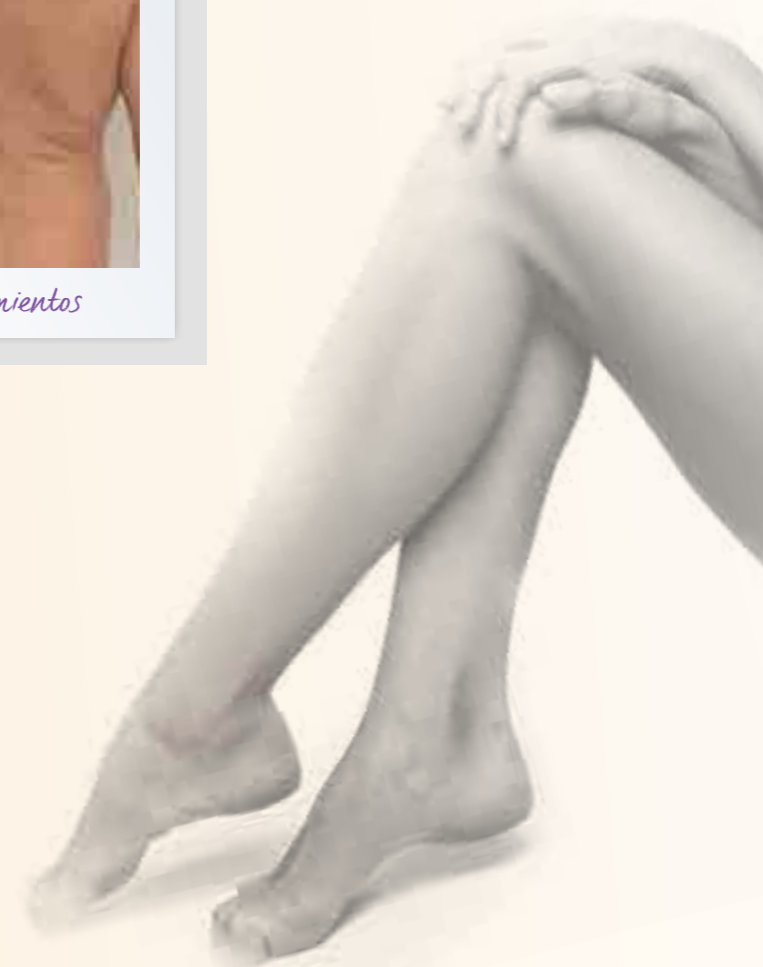

INDICACIONES

Rejuvenecimiento de la piel

Las estrías, la pigmentación superficial y las asperezas se alisan y equilibran mediante la tecnología de radiofrecuencia de microplasma focalizado. La incorporación de la tecnología Impact ofrece una solución compuesta para una reparación de la piel y una mejora estética de efectividad suprema.

Aplicaciones



Microplasma

Realiza una ablación y calienta la piel mediante tecnología de microplasma.



Microplasma+IMPACT

Combina microplasma con la tecnología de ultrasonido de IMPACT para la penetración profunda de agentes tópicos.



Punta de colibrí

Tecnología basada en radiofrecuencia unipolar para la producción de chispas de Microplasma, que proporciona energía por medio de una punta de forma especial que genera microperforaciones controladas. La piel se encarga de reparar esta microablación, que la deja más tersa. El aplicador alcanza áreas anatómicas difíciles de alcanzar y difíciles de tratar, como el área periorbital y perioral, y se enfoca en el exceso de piel flácida y laxa.



Antes



Luego de 2 tratamientos

Cortesía del Prof. Igor Pinson, MD y PhD, Dermatólogo, Moscú, Rusia



Antes



Luego de 1 tratamiento

Cortesía de Choi Jun, MD, PhD, Clínica MayLin, Seúl, Corea



Antes



Luego de 3 tratamientos

Cortesía de la Dra. Ines Verner MD, Dermatóloga, Clínica Verner

“El rejuvenecimiento facial es un procedimiento clave contra el envejecimiento. Al combinar el exclusivo ultrasonido en frío con la tecnología de radiofrecuencia, Alma Accent ofrece excelentes resultados para tratar tanto la acumulación de grasa como la laxitud de la piel en el mismo procedimiento, lo que devuelve a los clientes el aspecto joven de su rostro”.


Dra. María Claudia, Almeida Issa, Brasil

INDICACIONES


Laxitud de la piel

Las imperfecciones desafiantes de la piel relacionadas con la edad, incluidas las arrugas, las líneas finas, el tono desigual y la laxitud de la piel, se pueden mejorar significativamente con Accent Prime. Los tratamientos abordan de manera efectiva las indicaciones existentes y, al mismo tiempo, ayudan a reafirmar la piel para combatir el envejecimiento futuro.


Aplicadores




CoaxiPolar
Crea un calentamiento dérmico superficial local en áreas delicadas con monitoreo en tiempo real de la temperatura de la piel.




UniFace
Un aplicador Unipolar RF diseñado especialmente para el tratamiento del rostro.



TuneFace
Radiofrecuencia fraccional asistida por vacío para tensar la piel del rostro.



UniLarge
Utiliza energía de tecnología Unipolar RF para contraer las fibras de colágeno dentro de la piel y estimular la formación de colágeno nuevo.



Tune Periorbital
Tensa la piel laxa alrededor de los ojos.

“La tecnología de adaptación de impedancia de Alma permite llevar la máxima cantidad de energía de radiofrecuencia al tejido objetivo. En combinación con capacidades únicas de control de profundidad, la energía puede enfocarse dentro del área subdérmica para preservar así la epidermis. El método es seguro y fácil de usar”

KeeLee Tan, MD. Clínica Rejuvenate, Perth, Australia Occidental




Cortesía de KeeLee Tan, MD.
Clínica Rejuvenate, Perth,
Australia Occidental


Celulitis

Los depósitos de grasa individuales agrandados debajo de la piel que empujan el tejido conectivo subyacente crean una superficie irregular en la piel y la apariencia de los hoyuelos característicos de la celulitis. Accent Prime utiliza una combinación de energía de radiofrecuencia y masaje mecánico para mejorar el metabolismo del tejido adiposo y reducir así el volumen de las células grasas, estimular el drenaje linfático y suavizar visiblemente la textura de la piel.

Aplicadores



UniBody
Combina la tecnología UniPolar RF de alta energía con un aplicador mecánico para brindar un calentamiento dérmico profundo al mismo tiempo que aumenta el metabolismo dentro del tejido subcutáneo y mejora la apariencia de la celulitis.



UniLarge
Utiliza energía UniPolar RF para suavizar visiblemente la textura de la piel.



Cortesía del Dr. Ramón H. Rosado, MD, México



Cortesía del Dr. JD McCoy, Contour Medical, Gilbert AZ

Accent *Prime*

Love Your Shape

BENEFICIOS



TECNOLOGÍAS COMBINADAS

Las tecnologías combinadas y las opciones de tratamiento producen resultados más rápidos y duraderos en menos sesiones de tratamiento.



SELECTIVO

El tratamiento enfocado en múltiples profundidades permite un mayor control del tratamiento y mejores resultados sin dañar el tejido circundante.



SEGURO

Los tratamientos con Accent Prime son seguros y efectivos para todo tipo de piel (I-VI), así como para las zonas finas y delicadas del rostro, cuello y escote.



AGRADABLE

El calentamiento gradual y el sistema de enfriamiento integrado evitan el dolor para obtener un tratamiento más agradable.



CASI SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD

Los pacientes pueden volver a sus actividades normales después del tratamiento.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Alemania
Tel.: + 49-911/89-11-29-0
Fax: + 49-911/89-11-29-99

info@alma-lasers.de
info@almalasers.com

© 2022 Alma, Todos los derechos reservados.

Alma, el logotipo de Alma, Accent Prime, Accentuate, AlmaWave, Cold Shear Waves, Impact, Microplasma, MiniSpeed, TuneBody, TuneFace, UltraSpeed y Unipolar son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en EE. UU. o en otros países.

* Para patentes de EE. UU., consulte www.almainc.com/patents.

www.almaccentprime.com

CE 0459  PBAC14061610_04

Comuníquese con
Alma

