

FemiLift

Give Your Feminine Life a Lift

La solución perfecta para **el bienestar de la mujer**

- Seguro, fácil y eficaz
- Tratamiento breve y mínimamente invasivo
- Mejora el alcance de su consulta y agrega valor al ejercicio de su profesión.

Alma
For You. For Life.



El renacimiento de la feminidad

En la vida de una mujer, los cambios fisiológicos, como el parto, las fluctuaciones de peso y los cambios hormonales debido al paso de los años y la menopausia pueden originar diversas afecciones que podrían perjudicar su calidad de vida, su autoestima y su sexualidad.

Desde la tradicional ablación de verrugas genitales (condilomas*), el uso del láser en la salud genital femenina ha evolucionado hacia una gran variedad de tratamientos que abordan los síntomas posteriores al parto*, la menopausia y el cáncer, así como las inquietudes estéticas y la mejora de la función sexual*.

FemiLift es una plataforma versátil que les permite a los médicos de cabecera tratar las distintas indicaciones femeninas de manera rápida y eficaz. Dado que las intervenciones no requieren anestesia general y el tiempo de inactividad es mínimo, las mujeres pueden retomar su rutina y recuperar la confianza en sí mismas poco tiempo después.

*ROW

FemiLift de Alma

Tecnología de vanguardia

Desde la década de 1960 se usan láseres de CO₂, ampliamente aceptados como el tratamiento de referencia para intervenciones ginecológicas, otorrinolaringológicas y dermatológicas, principalmente gracias a sus extraordinarios resultados, que desafían a la edad. Gracias a la potencia, la precisión y la versatilidad de la tecnología láser de CO₂, FemiLift ofrece tres modos de aplicación de energía y una amplia variedad de aplicadores específicos, lo que la convierte en la plataforma de tratamiento más completa y eficaz para la salud femenina.

Tres modos de funcionamiento

01

Pixel CO₂: aplicación fraccionada de energía

La aplicación fraccionada y de pulso largo único de energía del láser de CO₂ de FemiLift permite el uso de niveles de energía mucho más altos, mediante duraciones de pulso más prolongadas, para lograr un poderoso e impactante efecto térmico. La energía del láser de CO₂ se aplica al tejido vaginal a través de un elemento óptico difractivo (DOE) que pixela el haz en 81 píxeles microscópicos en un patrón de 9 x 9.

La ablación limitada mediante columnas microscópicas de zona térmica penetra profundamente en la submucosa, y deja intacto el tejido circundante. Esto permite acelerar el proceso de cicatrización de las heridas, al tiempo que estimula la síntesis de colágeno nuevo y la neovascularización como parte del proceso de regeneración del tejido.

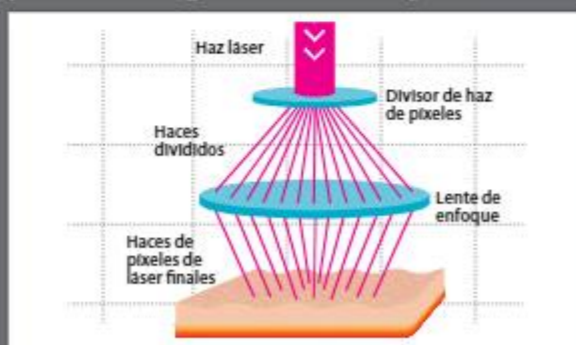


Figura A: La energía del láser de CO₂ se aplica al tejido vaginal mediante un patrón de píxeles, lo que favorece la rápida cicatrización y el rejuvenecimiento de la pared vaginal.

02

Corte y coagulación: aplicación focalizada de energía

FemiLift combina los modos de funcionamiento de corte y coagulación en un único entorno sinérgico, de forma que los médicos pueden realizar ambas acciones sin tener que alternar los aplicadores ni cambiar los parámetros durante los procedimientos. Los modos de corte y coagulación son altamente eficaces en las aplicaciones quirúrgicas que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la coagulación del tejido.

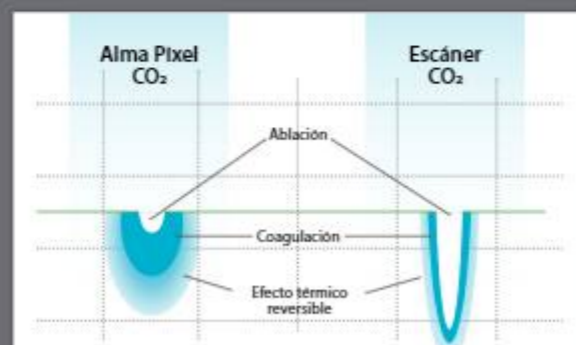


Figura B: El láser de CO₂ logra un efecto térmico profundo que favorece la remodelación del colágeno vaginal.

03

Aplicación de energía térmica

FemiLite es un modo de tratamiento novedoso diseñado específicamente para pacientes que padecen atrofia vaginal grave y dolor intenso. El tratamiento, administrado mediante aplicadores FemiLift, emplea energía de baja potencia y alta frecuencia de repetición, lo que se traduce en un tratamiento suave y poco doloroso.

*ROW



FemiLift ofrece la variedad más amplia de aplicaciones ginecológicas

“ FemiLift ofrece un alto nivel de satisfacción en las pacientes y una pronta recuperación. Es un procedimiento muy aceptado por las pacientes que buscan un tratamiento de primera calidad, eficiente y con resultados superiores y duraderos. ”

Dr. Alexander Bader, FAAOCG

Ginecólogo especialista en reconstrucción y estética de la Junta Europea de Obstetricia y Ginecología. Fundador y presidente de Sociedad Europea de Ginecología Estética (ESAG), Londres, Dubái y Atenas

Aplicadores FemiLift y Slim

Diseñados para usarlos en los modos de aplicación de energía fraccionada y de baja potencia y alta frecuencia de repetición para el tratamiento de las siguientes afecciones:

GSM/AVV | SUI | laxitud vaginal* | atrofia grave y dolor intenso*

FemiLift (diámetro: 28 mm)

El aplicador FemiLift presenta un diseño exclusivo para adaptarse a distintos tamaños de vagina y garantizar la máxima comodidad de la paciente. Durante el tratamiento, el médico gira el aplicador en un patrón de 360 grados para cubrir toda la pared vaginal, y logra así un alcance y una eficiencia óptimas.



FemiLift Slim (diámetro: 18 mm)

El diseño del aplicador FemiLift Slim se adapta a mujeres con estructuras anatómicas más estrechas por naturaleza y a aquellas que han experimentado cambios anatómicos o histológicos, como atrofia vaginal o daños en el tejido derivados de tratamientos oncológicos.



Funda higiénica desechable de FemiLift

Compatible con los aplicadores FemiLift y FemiLift Slim.



Aplicadores Focusing, TruSpot y TruScan

Usan el modo de aplicación de energía de corte y coagulación para el tratamiento de indicaciones quirúrgicas que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la coagulación de tejido; por ejemplo: verrugas genitales* | labioplastia* | neoplasia intraepitelial cervical (CIN) | VIN | neoplasia intraepitelial vaginal

Focusing (50 mm y 100 mm)

El punto focal a una distancia de 50 mm y 100 mm proporciona un tamaño de punto de haz de 0,125 mm y 0,20 mm, respectivamente.



Aplicador LiteScan

Combina múltiples opciones de exploración que incluyen el patrón fraccional para el tratamiento de las siguientes afecciones: cicatrices | mejora de la pigmentación de los labios mayores | eliminación de condilomas* y más

Es un escáner láser controlado por un microprocesador que optimiza los procedimientos a través de configuraciones automáticas de los parámetros del haz láser. El aplicador permite la ablación superficial sin carbonización, la incisión y la escisión de tejidos y dos modos de funcionamiento según la densidad de potencia: alta densidad de potencia (corte o ablación); baja densidad de potencia (coagulación y calentamiento). LiteScan también permite múltiples opciones de exploración.



*ROW



“ FemiLift es un tratamiento médico ambulatorio novedoso con excelentes resultados que está abriendo el camino a nuevas opciones de tratamiento quirúrgico ambulatorio seguras y eficaces. ”

Prof. Paolo Scollo
Presidente de S.I.G.O., Roma, Italia

Valor agregado para el ejercicio de su profesión:

- Acceda a un mercado nuevo y rentable de remodelación vaginal*
 - Plataforma versátil con alto retorno sobre la inversión (ROI): múltiples indicaciones de salud femenina y cirugía estética
 - Exclusivo modo no ablativo
 - Tecnología de píxeles única
-

“ La evaluación de los factores del estudio indica que el costo de un láser equivale a un promedio de 10 a 20 cirugías, según el país. ”

Dr. Jorge Alberto Elías
Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso Pelviano y la Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina

Una vida femenina más plena para sus pacientes:

- Tratamiento de diversas indicaciones de la salud femenina
- Tratamientos cortos y seguros
- Sin dolor y con un tiempo de inactividad mínimo

*ROW



El cambio es un proceso natural, pero no siempre se produce de acuerdo con nuestras expectativas.
Es entonces cuando la tecnología de Alma nos devuelve el control.

Somos una empresa líder en el campo de la estética médica que permite a miles de médicos ayudar a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada persona que acude a su consulta.

Experiencia clínica, servicio especializado y asesoramiento de marketing, así como desarrollos tecnológicos innovadores: todo ello se combina para crear un sistema de asistencia integral en su beneficio. En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los pacientes esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. Cuando nuestra solución está en sus manos, esa promesa se hace realidad.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Alemania
Tel. + 49 911/89 11 29-0
Fax + 49 911/89 11 29-99

Correo electrónico:
info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2022 Alma. Todos los derechos reservados. Alma, su logotipo y FemiLift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en Estados Unidos o en otros países.

PBFL29081901_03

COMUNIQUESE CON
ALMA

